

VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Leżanka przeznaczona jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia leżanki wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego siadania na leżankę (wskakiwania),
4. Zabrania się siadania i opierania na podglówku, półce,
5. Jeżeli pacjent układa się na leżance bez ubrania rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować leżankę.

VII. Zalecenia

1. Użytkować leżankę zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LEŻANKI NOVA KOMFORT



I. Dane techniczne

Długość	1940 mm
Szerokość	700 mm
Wysokość regulowana skokowo	580 - 830 mm co 50 mm
Regulacja kąta podnoszenia poduszki	55 st
Regulacja kąta łamania blatu	3-stopniowa możliwość wyboru kąta
Waga	29 kg
Grubość pianki	60 mm
Dopuszczalne obciążenie	150 kg

II. Budowa

Dla zwiększenia funkcjonalności wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

- możliwość regulacji wysokości;
 - blat dolny leżanki;
 - grubsza pianka;
 - regulacja kąta nachylenia zagłówka;
 - regulacja kąta łamania blatu;
 - możliwość wyposażenia w dodatkowe akcesoria:
 - * mocowany z tyłu wieszak na ręcznik papierowy,
 - * podglówek - praktycznie każdy dostępny w naszej ofercie.
 - * półka tylna
- Tapicerka dostępna w pełnej gamie kolorów oferowanych przez naszą firmę.

III. Zastosowanie

Leżanka NOVA KOMFORT przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjnych, inhalacji, masażu, zabiegów kosmetycznych i fizjoterapii. Znajduje swoje zastosowanie również w leczeniu i łagodzeniu skutków urazów.

IV. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy lakierowane (drewniane).** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active.
2. **Eko - skóra, skaj.** Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

V. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active.

