

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LEŻANKI PRIMO



I. Dane techniczne

Długość	184 cm
Szerokość	68 cm
Wysokość	65 cm
Waga bez wyposażenia	23 kg
Kąt odchylenia podglówka	0° – 30°
Dopuszczalne obciążenie	200 kg

II. Zastosowanie

Leżanka przeznaczona jest do zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii i masażu.

III. Budowa

1. Błat drewniany pokryty tapicerką,
2. Nogi zewnętrzne,
3. Poprzeczka nogi,
4. Rozpórka dolna nóg zewnętrznych,
5. Podglówek ruchomy,
6. Podpórka podglówka,
7. Wieszak na ręcznik (wyposażenie dodatkowe).

IV. Obsługa

Po ustawieniu leżanki w miejscu przeznaczenia sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu.

Ułożenie pacjenta:


Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na leżance. Po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść z leżanki.

V. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active..
2. **Drewno, sklejka.** Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych. Uwaga! Drewno jako naturalny surowiec może posiadać różnice w układzie stoi, różnice w odcieniach koloru jak i naturalne wstawki typu: smugi, kropki. Nie obniża to jakości wyrobu a wręcz podkreśla jego naturalne pochodzenie. Cechy takie nie są podstawą do reklamacji,
3. **Eko - skóra, skaj.** Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

VI. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active.

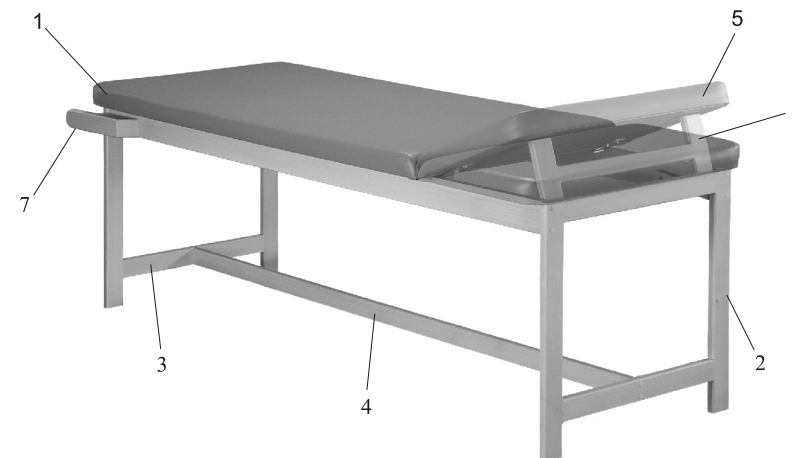

VII. Uwagi eksploatacyjne

1. Leżanka przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia leżanki wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego siadania na leżankę (wskakiwania),
4. Zabrania się siadania, klękania i opierania na podglówku, półkach i podłokietnikach,
5. Jeżeli pacjent układa się na leżance bez ubrania rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół,
6. Leżanka powinna być użytkowana i przechowywana z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła,
7. Leżanki nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki,
8. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację,
9. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.

VIII. Zalecenia

1. Użytkować leżankę zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.