

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### LEŻANKI STANDARD I



## I. Dane techniczne

Długość	184 cm
Szerokość	55 cm
Wysokość	50 cm
Waga	25 kg
Kąt odchylenia podglówka	-80° do +45°
Dopuszczalne obciążenie	200 kg

## II. Zastosowanie

Leżanka przeznaczona jest do zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii i masażu.

## III. Budowa

1. Błat drewniany pokryty tapicerką,
2. Stelaż nóg,
3. Poprzeczka nogi,
4. Rozpórka dolna nóg,
5. Podglówek ruchomy,
6. Podpórka podglówka wraz z regulatorem,
7. Stopka poziomująca.

## IV. Obsługa

Po ustawieniu stołu w miejscu przeznaczenia sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu. Do regulacji służy stopka, która umożliwi wypoziomowanie stołu.


Uchylenie i opuszczanie podglówka polega na uwolnieniu zatrzasku mimośrodowego na prowadnicy, uchwyceniu ręką i ustawieniu elementu na żądaną wysokość, a następnie zablokowaniu zatrzasku. Zatrzask stanowi dźwignię, która jest unoszona lub opuszczana.

### Ułożenie pacjenta:

Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole, a po skończonym zabiegu pomaga bezpiecznie zejść ze stołu.

## V. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active..
2. **Drewno, sklejka.** Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych. Uwaga! Drewno jako naturalny surowiec może posiadać różnice w układzie stoi, różnice w odcieniach koloru jak i naturalne wstawki typu: smugi, kropki. Nie obniża to jakości wyrobu a wręcz podkreśla jego naturalne pochodzenie. Cechy takie nie są podstawą do reklamacji,
3. **Eko - skóra, skaj.** Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

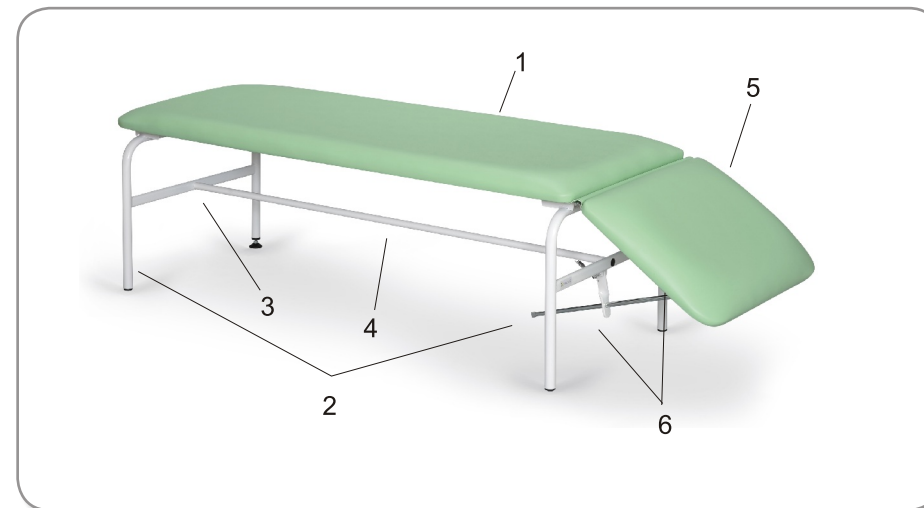

## VI. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active.

## VII. Uwagi eksploatacyjne

1. Leżanka przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia leżanki wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego siadania na leżankę (wskakiwania),
4. Zabrania się siadania, klękania i opierania na zagłówku,
5. Jeżeli pacjent układa się na leżance bez ubrania rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół,
6. Leżanka powinna być użytkowana i przechowywana z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła,
7. Leżanki nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki,
8. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację,
9. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.

## VIII. Zalecenia

1. Użytkować leżankę zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.