

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LEŻANKI STANDARD III



I. Dane techniczne

Długość	190 cm
Szerokość	68 cm
Wysokość	75 cm
Waga	35 kg
Kąt odchylenia podglówka	-80° do +45°
Kąt odchylenia poduszki środkowej	-0° do +60°
Dopuszczalne obciążenie	200 kg

II. Zastosowanie

Leżanka przeznaczona jest do zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii i masażu.

III. Budowa

1. Błat drewniany pokryty tapicerką,
2. Błat podnoszony,
3. Stelaż nóg,
4. Poprzeczka nogi,
5. Rozpórka górna nóg,
6. Rozpórka dolna nóg,
7. Podglówek ruchomy,
8. Podpórka podglówka,
9. Regulator kąta poduszki,
10. Stopka poziomująca.

IV. Obsługa


Po ustawieniu stołu w miejscu przeznaczenia sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu. Do regulacji służy stopka(10), która umożliwia wypoziomowanie stołu. Uchylenie i opuszczanie podglówka polega na uwolnieniu regulatora mimośrodowego (9) na prowadnicy, uchwyceniu ręką i ustawieniu elementu na żądaną wysokość, a następnie zablokowaniu zatrzasku. Zatrzask stanowi dźwignię, która jest unoszona lub opuszczana. Podnoszenie części leżyska polega na unoszeniu jej do góry na żądaną wysokość (13 pozycji). Opuszczenie jest możliwe po wychyleniu leżyska do skrajnej, górnej granicy wychylenia.

Ułożenie pacjenta:

Pacjent siada z boku na biał tapicerowany i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole, a po skończonym zabiegu pomaga bezpiecznie zejść ze stołu.

V. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active..
2. **Drewno, sklejka.** Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych. Uwaga! Drewno jako naturalny surowiec może posiadać różnice w układzie słoi, różnice w odcieniach koloru jak i naturalne wstawki typu: smugi, kropki. Nie obniża to jakości wyrobu a wręcz podkreśla jego naturalne pochodzenie. Cechy takie nie są podstawą do reklamacji.
3. **Eko - skóra, skaj.** Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki

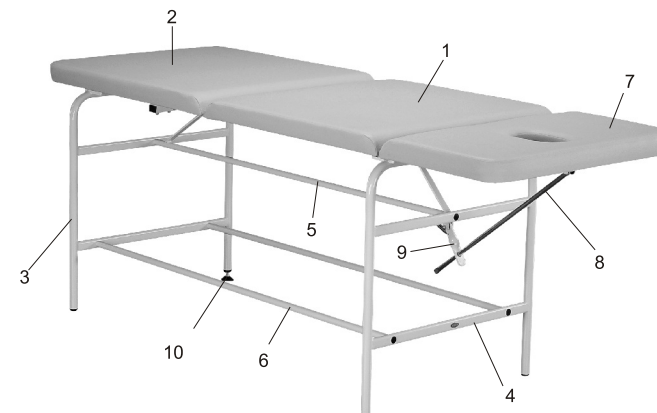

Santi Cloth Active. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanyymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

VI. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active.

VII. Uwagi eksploatacyjne

1. Leżanka przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia leżanki wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego siadania na leżankę (wskakiwania),
4. Zabrania się siadania, klęknięcia i opierania na zagłówku,
5. Jeżeli pacjent układa się na leżance bez ubrania rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół,
8. Leżanka powinna być użytkowana i przechowywana z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła,
9. Leżanki nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki,
10. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację,
11. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.

VIII. Zalecenia

1. Użytkować leżankę zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.