

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI MATERACA DO REHABILITACJI**

MODEL:  
G-MA4CK



### I. Dane techniczne

	Złożone	Rozłożone
Długość	50 cm	200 cm
Szerokość	120 cm	120 cm
Wysokość	12 cm	3 cm

### II. Zastosowanie

Materace przeznaczone są do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, łagodzenia skutków urazów, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych.

Materace mogą być wykorzystywane w:

- gabinetach lekarskich i odnowy biologicznej
- ośrodkach zdrowia
- w domu u pacjenta

### III. Budowa

Materace wykonane z twardej pianki poliuretanowej, pokryte dzianiną powlekaną.

1. Pokrowiec transportowy
2. Rzep zabezpieczający

### IV. Obsługa

Aby rozłożyć materac należy rozpiąć rzepy, znajdujące się po bokach.

Po zakończeniu ćwiczeń materac można w prosty sposób złożyć w poręczną „walizkę” zamykaną na rzepy.

### V. Czyszczenie i dezynfekcja

Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetrarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami. Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: „Bechtomid Spray”, „Incidin Plus”, „Incidur”.

### VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Materac przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia materaca wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego szarpania za uchwyty transportowe jak i za rzepy zabezpieczające.

### VII. Zalecenia

1. Użytkować materac zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.



CE

1

Poz. 1



CE

Poz. 2