


Tkanina ekranu wykonana z: - poliester (67%),
- bawełna (33%).

VI. Zalecenia

1. Użytkować parawan zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać,

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARAWANÓW METALOWYCH STANDARD

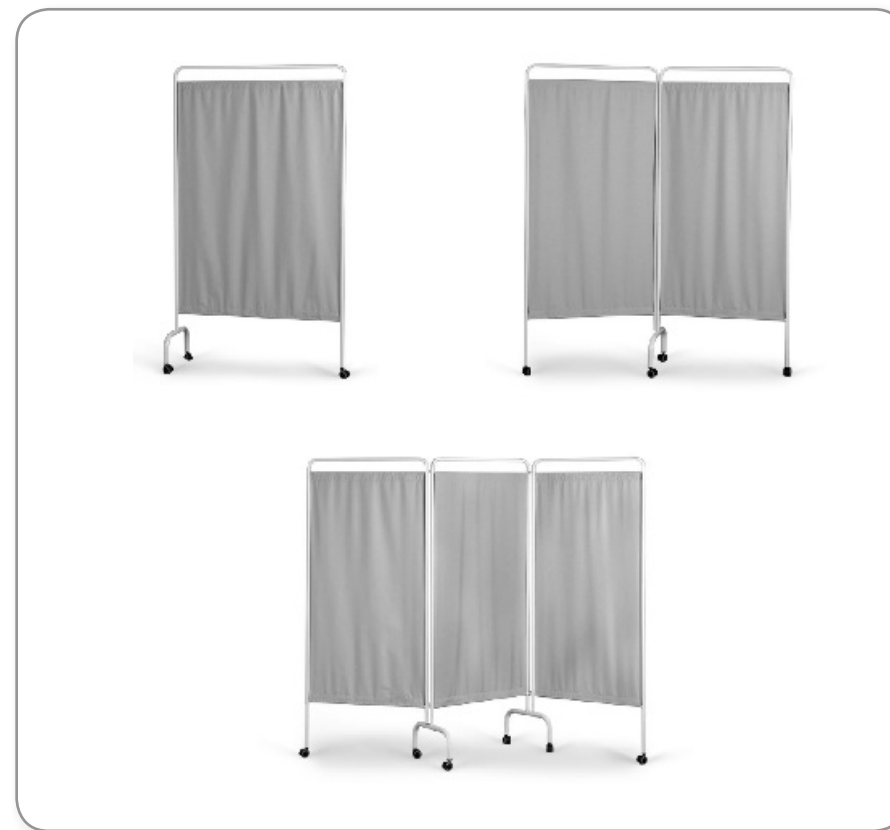

I. Dane techniczne

	POJEDYŃCZY	PODWÓJNY	POTRÓJNY
Długość	164 cm	164 cm	164 cm
Szerokość	95 cm	140 cm	210 cm
Głębokość	35 cm	35 cm	35 cm
Waga	5 kg	8 kg	12 kg

II. Zastosowanie

Wyrób stosowany w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych i operacyjnych do zapewnienia podstawowej izolacji pacjenta dla zapobiegania chorobom roznoszonym drogą kropelkową/ powietrzną oraz zapewnienia pacjentowi leżącemu podstawowych warunków dyskrecji w trakcie zabiegów i codziennych czynności życiowych.

Parawany szpitalne stanowią wyposażenie łóżka szpitalnego, kozetki lekarskiej lub leżanki lekarskiej.

III. Budowa

	POJEDYŃCZY	PODWÓJNY	POTRÓJNY
1. Stelaż metalowy	1 szt.	1 szt.	1 szt.
2. Podstawa metalowa z kółkami	1 szt.	1 szt.	2 szt.
3. Ekran parawanu	1 szt.	2 szt.	3 szt.
4. Zawiasy	—	2 szt.	4 szt.
5. Taśma rzep	2 szt.	4 szt.	6 szt.

IV. Obsługa

Kolejność rozkładania parawanu:

1. Rozłożyć stelaż (1),
2. Włożyć podstawy metalowe z kółkami (2) w rurki stelaża, trafiając w otworek znajdujący się w stelażu
3. Założyć ekran parawanu do stelaża metalowego (3) i zamocować za pomocą taśmy rzep (5).

V. Konserwacja

Konserwacja polega na pocieraniu wilgotną szmatką stelaża parawanu na mokro, można stosować detergenty rozpuszczone w ciepłej wodzie.

Do czyszczenia parawanu nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierowaną!

Stelaż może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

W celu czyszczenia ekranu parawanu zastosować się do poniższych zaleceń:

- Temperatura prania od 60 do 90 stopni

- Nie wolno wybielać

- Prasować w średniej temperaturze


- Wskazówka dla pralni dotycząca środka zalecanego przy praniu chemicznym

- Można suszyć w suszarce

Parawan metalowy pojedynczy



Parawan metalowy podwójny

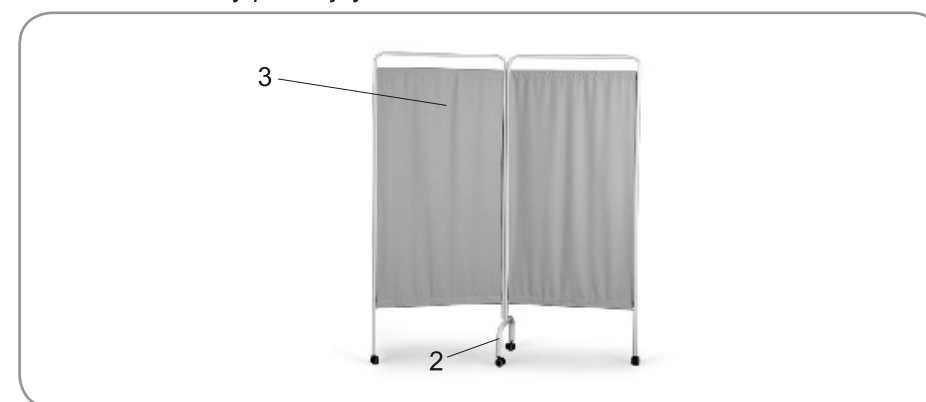

Parawan metalowy potrójny

