

#### V. Złożenie krzesła

1. Zdemontować podglówek (7),
2. Rozpiąć zatrzask półki przedniej,
3. Złożyć stelaż krzesła (poz. 1),
4. Umieścić krzesło w pokrowcu - jeśli występuje,
5. Podglówek umieścić w kieszeni pokrowca.

#### VI. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych,
2. **Eko - skóra, skaj.** Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

#### VII. Dezynfekcja

Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: "Incidin Plus", "Incidur".

#### VIII. Uwagi eksploatacyjne

1. Krzesło przeznaczone jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia krzesła wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (wskakiwania),
4. Nie regulować wysokości sprężyny gazowej przy pełnym obciążeniu krzesła,
5. Na stelaż krzesła udzielamy 2 lata gwarancji a na siłownik 1 rok gwarancji.
6. Podczas korzystania z krzesła zwrócić uwagę czy półka pod ramiona tapicerowana jest zapięta na pasek regulujący położenie półki(9),
7. Podczas korzystania z krzesła żaden element stelaża półki pod ramiona tapicerowanej (5) nie może opierać się o stelaż krzesła.

#### IX. Zalecenia

1. Użytkować krzesło zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI KRZESŁA PRESTIGE - REH



### I. Dane techniczne

Długość u podstawy	80 cm
Szerokość u podstawy	55 cm
Wysokość z podglówkiem	130 cm
Waga bez wyposażenia	9 kg
Dopuszczalne obciążenie	150 kg

### II. Zastosowanie

Krzesło rehabilitacyjne Prestige jest wykorzystywane w leczeniu lub łagodzeniu przebiegu chorób oraz łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia poprzez umożliwianie prowadzenia skutecznych i bezpiecznych zabiegów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, masażu

### III. Budowa

- |     |                                  |                  |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 1.  | Stelaż krzesła                   | - 1 szt.         |
| 2a. | Regulacja sprężyną gazową        | - 1 szt. (opcja) |
| 2b. | Regulacja skokowa                | - 1 szt. (opcja) |
| 3.  | Siedzisko tapicerowane           | - 1 szt.         |
| 4.  | Podkolanniki tapicerowane        | - 2 szt.         |
| 5.  | Półka pod ramiona tapicerowana   | - 1 szt.         |
| 6.  | Poduszka piersiowa tapicerowana  | - 1 szt.         |
| 7.  | Podglówek regulowany             | - 1 szt.         |
| 8.  | Linka zmiany wysokości           | - 1 szt.         |
| 9.  | Pasek regulujący położenie półki | - 1 szt.         |
| 10. | Kółka transportowe               | - 2 szt.         |

### IV. Obsługa

Kolejność rozkładania krzesła:


1. Wyciągnąć krzesło z pokrowca - jeśli występuje (poz.1),
2. Jedną dłoń umieścić na poduszce (3) i lekko pociągnąć do siebie, drugą rękę umieścić na podstawie poduszki piersiowej (6) i otworzyć krzesło (poz. 2) rozsuwając podstawy stelaża na boki,
3. Wysokość krzesła, w zależności od wzrostu pacjenta, regulujemy za pomocą regulatora wysokości znajdującego się na lince stalowej (8),
4. Sprężyna gazowa (2a) lub regulacja skokowa (2b) umożliwia zmianę kąta nachylenia siedziska (3),
5. Poduszka piersiowa może być zastąpiona klinem piersiowym (wyposażenie dodatkowe) w przypadku kobiet ciężarnych lub z dużym biustem. Zmianę położenia poduszki umożliwia wszyta rzepa.
6. Półka pod ramiona (5) umożliwia wygodne ułożenie się pacjenta. Za szybką regulację półki odpowiada zestaw przegubów i krzywek wykonanych z tworzywa technicznego. Aby zmienić wysokość położenia półki należy zwolnić klawisz, ustawić półkę w żądanym położeniu i zatrzasknąć klawisz. W celu jej wypoziomowania należy wydłużyć lub skrócić pas mocujący.
7. Podglówek (7) regulowany przymocowany jest do krzesła za pomocą dwóch gałek motylkowych wykonanych w całości z PCV. Aby przemieścić podglówek należy odkręcić obydwie gałki, wysunąć podglówek na żądaną wysokość, po czym powtórnie zakręcić gałki.

**Uwaga!** Przed posadzeniem pacjenta należy sprawdzić:


- prawidłowość rozstawienia stelaża krzesła,
- stan techniczny linki i jej naciąg,

Ułożenie pacjenta:

Pacjent siada na siedzisko, kolana układa na podkolannikach (4), pochyla się do przodu, opiera ręce na półce pod ramiona i umieszcza twarz w poduszce podglówka regulowanego.

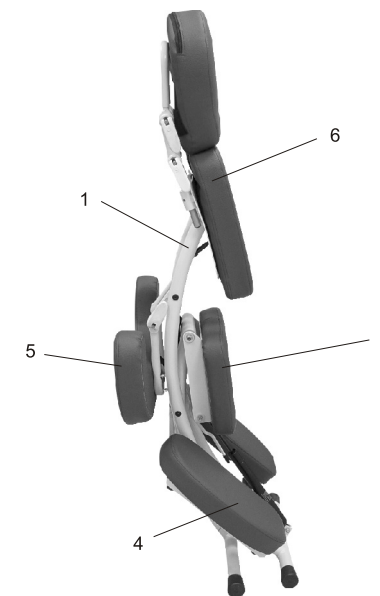

Poz. 1

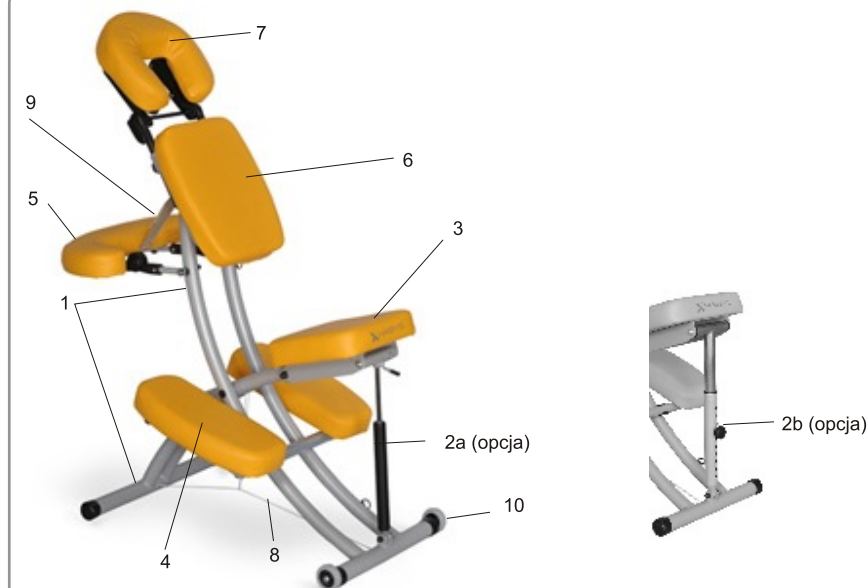

Poz. 2