

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KRZESŁA REHABILITACYJNEGO
MODEL ERGO-REH
ERG



I. Dane techniczne

Konstrukcja krzesła wykonana jest z metalu, system regulacji - skokowy, ręczny daje możliwość dopasowania do każdej sylwetki.

Długość	75 cm
Szerokość	48 cm
Wysokość regulowana skokowo	50 - 66 cm
Waga	7,5 kg
Dopuszczalne obciążenie	150 kg

II. Zastosowanie

Przenośne, składane ergonomiczne krzesło metalowe stosowane jest w celu łagodzenia skutków urazów oraz korygowania budowy anatomicznej.

III. Budowa

1. Stelaż metalowy - 1 szt.
2. Komplet poduszek tapicerowanych - 2 szt.
3. Komplet kółek - 4 szt.

IV. Obsługa

Kolejność rozkładania krzesła:

1. Podnieść górną część stelaża za poduszkę siedziska,
2. Ustawić wymaganą wysokość, za pomocą regulacji,

Uwaga! Przed zajęciem miejsca należy sprawdzić:
- prawidłowość umieszczenia regulacji wysokości,

V. Konserwacja

Konserwacja polega na wycieraniu krzesła na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia.

Do czyszczenia krzesła nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić powłokę lakierniczą!

VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby jednocześnie,
2. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (wskakiwania),

VII. Zalecenia

1. Użytkować krzesło zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

