

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOTEL DO POBIERANIA KRWI I, II



I. Dane techniczne

Głębokość	73 cm
Szerokość	61 cm
Wysokość	86 cm
Waga	17 kg (z 1 podłokiet.), 19 kg (z 2 podłokiet.)
Dopuszczalne obciążenie	120 kg
Wymiary półki bocznej	50 x 19 cm

II. Zastosowanie

Fotel do pobierania krwi służy do zabiegów medycznych mających na celu bezpieczne i sprawne pobranie krwi od pacjenta.

III. Budowa

1. Konstrukcja metalowa,
2. Siedzisko,
3. Oparcie,
4. Podłokietniki,
5. Półka boczna (opcja)

IV. Obsługa


Po ustawieniu fotela w miejscu przeznaczenia sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu. Dostosować wysokość podłokietnika. Pacjent siada na siedzisko i przyjmuje dogodną mu pozycję. Powyższe czynności asekurowuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie ręki na podłokietniku.

V. Konserwacja i czyszczenie

1. Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active.
2. Eko - skóra, skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetrarcia powierzchni można zastosować: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

VI. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active

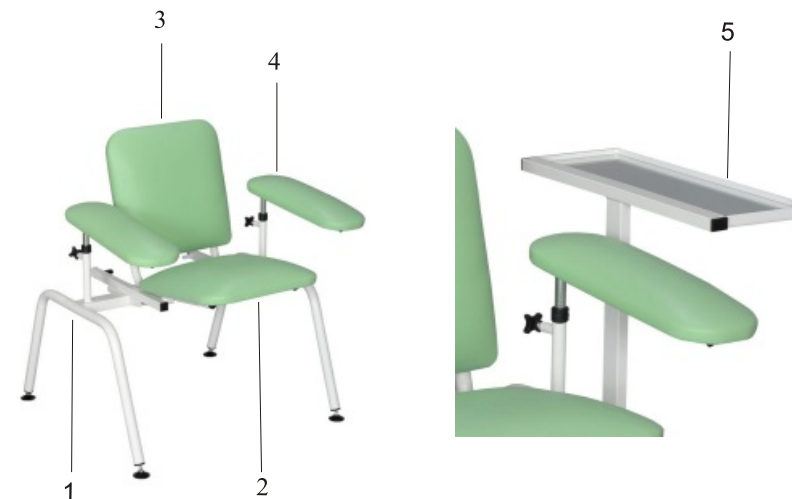

VII. Uwagi eksploatacyjne

1. Fotel przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia fotela wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego siadania na fotel (wskakiwania),
6. Fotel powinien być użytkowany i przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła,
7. Fotela nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki,
8. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację,
9. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.

VIII. Zalecenia

1. Użytkować fotel zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.