

JAK UŻYWAĆ PODUSZKI OTTO W POZYCJI LEŻĄCEJ NA BRZUCHU.

Połącz przezroczysty zawór powietrza przy poduszce z rurką ręcznej pompki.

WAŻNE: Przezroczysty zawór powietrza przy poduszce jest ograniczony przez dwa pierścienie luzujące, do których mocuje się zawór. Połącz rurkę tylko z pierwszym pierścieniem.

1. Upewnij się, że stalowy zawór powietrza przy ręcznej pompce jest zamknięty.
2. Napompuj poduszkę do pełna.
3. Pozwól pacjentce położyć się na brzuchu starannie układając piersi w poduszce.
4. Aby dopasować poduszkę do piersi pacjentki spuszczać powietrze odkręcając stalowy zawór do momentu, aż pacjentka odczuje komfort. Wtedy ponownie zamknij zawór.
5. Po użyciu zdezynfekuj poduszkę.

JAK UŻYWAĆ PODUSZKI OTTO EVOLUTION MASSAGE W POZYCJI LEŻĄCEJ NA WZNAK.


1. Napompuj poduszkę Otto ręczną pompką do 40-50% jej objętości.
2. Złóż poduszkę pod szyją jak na rysunku.
3. Ułóż poduszkę Otto u podstawy szyi, aby podnieść kark i głowę.
4. Po użyciu zdezynfekuj poduszkę.

WAŻNE: Po kilku godzinach z poduszki może ujść trochę powietrza (ale nie podczas masażu); w takim wypadku napompuj ponownie.

INSTRUKCJA PODUSZKA OTTO

MODEL:

Home Care, Beach Yacht & Spa, Evolution Massage

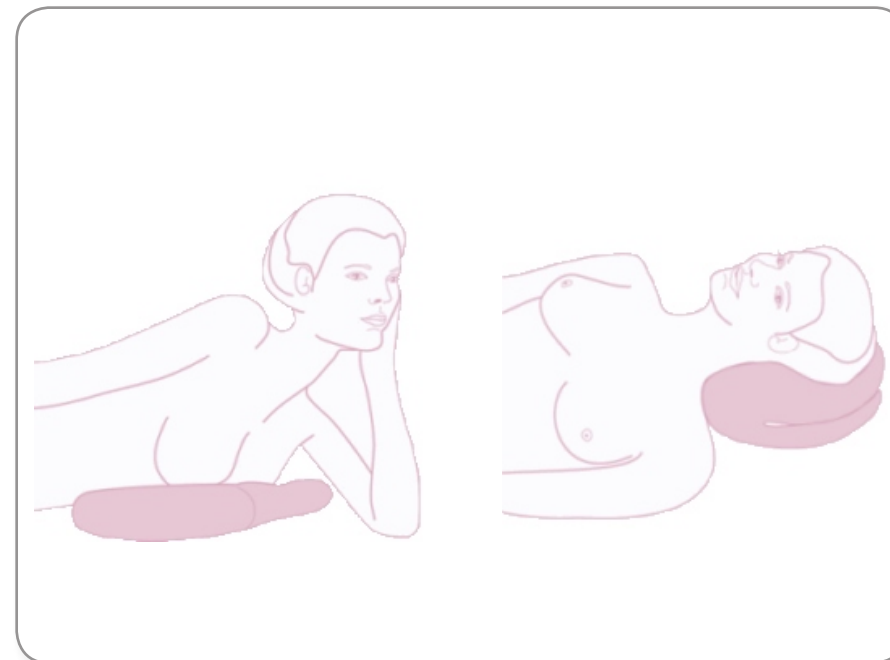

Komfortowa poduszka Otto pod piersi do pozycji leżącej na brzuchu.

Otto to Poduszka przynosząca ulgę piersiom w pozycji na brzuchu (twarzą w dół) Poduszka Otto występuje w jednym rozmiarze i jest odpowiednia dla wszystkich kobiet o rozmiarach piersi od pierwszego do szóstego (włoski rozmiar standardowy). Poduszka Otto jest nadmuchiwana i dopasowuje się do każdej kobiecej budowy. Podpierając klatkę piersiową poduszka Otto rozluźnia i rozciąga mięśnie pleców i szyi dając przyjemne uczucie ulgi oraz dobrego samopoczucia.

Poduszka - podglówek Otto do pozycji leżącej (na wznak).

Kształt ósemki sprawia, że poduszka dopasowuje się również do innych części ciała. Rzeczywiście poduszka Otto (napompowana w 50-60%) złożona na pół zamienia się w wygodny system łagodzenia nacisku, która wspiera i relaksuje czaszkę oraz kark dając przyjemne uczucie dobrego samopoczucia.

Wyprodukowana we współpracy z chirurgiem plastycznym

Poduszka Otto została stworzona i przetestowana dzięki współpracy i wieloletniemu doświadczeniu dr Andrea Roncarati, specjalisty chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej.

Projekt i łatwość przenoszenia

Opracowaliśmy szczegółowo projekt i kształt Otto w celu uzyskania wygodnej i skutecznej poduszki, łatwej w użyciu oraz przyjemnej do prezentacji. Po wypuszczeniu powietrza i złożeniu poduszka Otto jest lekkim dodatkiem, który z łatwością zmieści się w małej torebce.



Otto Evolution Massage

Profesjonalna linia poduszek pod piersi przeznaczonych do masażu leczniczego i estetycznego. Piersi są bardzo delikatną częścią kobiecego ciała i często narażone są na dyskomfort i ból. Szczególnie podczas masażu leżąc twarzą w dół piersi są narażone na podwójny nacisk wywierany przez ciężar ciała i masaż pleców. Poduszka Otto jest wygodna i odpowiednia dla wszystkich kobiet a w szczególności dla pacjentek z dużym biustem, we wczesnej ciąży i okresie karmienia piersią, z zespołem napięcia przedmiesiączkowego piersi, zapaleniem sutka, mastalgią i bólem piersi. Otto Evolution Massage jest wytrzymałą profesjonalną linią, stworzoną do utrzymania ciężaru kobiecego ciała i nacisku podczas masażu. Wykonana jest z pasków PVC, które pozwalają na odprowadzanie potu. Poduszkę można dopasować przez ręczne pompowanie powietrza. Poduszka Otto Evolution Massage jest profesjonalną pomocą, jest lekka, łatwo się składa i mieści się w małej torebce. Poduszka Otto jest również odpowiednia dla tych, którzy wykonują usługi w domu.



Otto Home Care

Komfortowa poduszka pod piersi i głowę do użytku domowego Poduszka Otto Home Care jest stworzona dla wszystkich kobiet, które lubią spać i odpoczywać w pozycji leżącej. Piersi są bardzo wrażliwą częścią ciała często narażoną na ból, dyskomfort i nadwrażliwość. Otto Home Care jest poduszką odpowiednią w początkowym okresie ciąży i laktacji, przy napięciu przedmiesiączkowym, bólu piersi, dla dużych piersi naturalnych i powiększanych operacyjnie. Otto Home Care to system łagodzenia nacisku, który zapobiega spłaszczeniu piersi i pozwala wszystkim kobietom na spokojny sen i relaks w pozycji leżącej na brzuchu. Poduszka Otto Home Care daje piersiom przyjemne uczucie komfortu bez nacisku. Jest pokryta miękką bawełną.



Otto Beach Yacht & Spa

Komfortowa poduszka pod piersi i głowę do użytku na zewnątrz Otto Beach Yacht & Spa chroni i podpira piersi i kark sprawiając, że wszystkie powierzchnie stają się wygodne. Wersja ta jest przeznaczona do leżenia na piasku, na leżakach nad morzem i w spa, na trawie i na twardych powierzchniach z włókna szklanego na jachcie, w basenie lub na kempingu na łonie natury. Otto Beach Yacht & Spa jest idealną poduszką do wygodnego opalania i odpoczynku.