

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZKA TRANSPORTOWEGO

WYG25



I. Dane techniczne

Wysokość	110 cm
Szerokość	31 cm
Tkanina kaletnicza podtrzymująca stół od spodu:	
Długość	68 cm
Szerokość	25 cm
Tkanina kaletnicza podtrzymująca stół od boku:	
Długość	23 cm
Szerokość	31 cm

II. Zastosowanie

Wózek transportowy służy do przewożenia składanego stołu do masażu. Duże kółka umożliwiają wygodne transportowanie stołu. Szczególnie polecany dla masażyстів wykonujących usługi w domu klienta.

III. Budowa

1. Konstrukcja aluminiowa
2. Tkanina kaletnicza podtrzymująca stół podczas transportu
3. Taśma nośna
4. Kółka

IV. Obsługa

1. Otworzyć wózek transportowy
2. Włożyć stół do wózka transportowego (zdz. 2)
3. Wyregulować taśmę nośną w zależności od wymiaru stołu
4. Przewozić stół trzymając za uchwyt pokryty pianką(5)

V. Konserwacja

Konserwacja polega na pocieraniu wilgotną szmatką stolika na mokro, można stosować detergenty rozpuszczone w ciepłej wodzie.

Do czyszczenia stolika nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierowaną! Stolik może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Zalecenia

1. Użytkować wózek transportowy zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać,

