

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SCHODKÓW METALOWYCH

WYG1, WYG2, WYG3



I. Dane techniczne

	I STOPIEŃ	II STOPNIE	III STOPNIE
Wysokość	4 cm	38,5 cm	56 cm
Szerokość	44 cm	38 cm	46 cm
Głębokość	31,5 cm	48 cm	64,5 cm
Dopuszczalne obciążenie	250 kg	250 kg	250 kg

II. Zastosowanie

Schodki metalowe znajdują swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich, szpitalach, salonach masażu w celu ułatwienia wejścia lub zejścia z leżanek.

III. Budowa

	POJEDYNCZY	PODWÓJNY	POTRÓJNY
1. Stelaż metalowy	1 szt.	1 szt.	1 szt.
2. Blaty drewniane pokryte tworzywem antypoślizgowym	1 szt.	2 szt.	3 szt.
3. Stopki gumowe	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Blaty drewniane pokryte są antypoślizgowym materiałem o grubości 2 mm. Dzięki specjalnemu metalowi stopień schodka w stanie suchym jest bezpieczny i spełnia wymagania antypoślizgowe Zakładu Nowych Techniki Wykończeniowych Instytutu Techniki Budowlanej.

IV. Obsługa

1. Ustawić schodek na twardym podłożu.
2. Czynności podczas wchodzenia lub schodzenia ze schodka asekuje masażysta lub opiekun.

V. Konserwacja

Konserwacja polega na pocieraniu wilgotną szmatką schodka na mokro, można stosować detergenty rozpuszczone w ciepłej wodzie.

Do czyszczenia schodka nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierowaną! Do czyszczenia blatu schodka nie stosować środków na bazie wosku i silikonu.

Stelaż może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Schodek przeznaczony jest dla jednej osoby jednocześnie.
2. Zabrania się gwałtownego wskakiwania na schodek.

VII. Zalecenia

1. Użytkować schodek zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać,

Schodek metalowy I stopień WYG1



Schodek metalowy II stopnie WYG2



Schodek metalowy III stopnie WYG3

