

#### VIII. Zalecenia

1. Użytkować stolik zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać,
3. Zalecany serwis po 2 latach użytkowania.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI STOLIKA DO BADAŃ NIEMOWLAŹ



## I. Dane techniczne

Długość	85 cm
Głębokość	65 cm
Wysokość	80 cm
Waga	20 kg
Dopuszczalne obciążenie	200 kg

## II. Zastosowanie

Stolik przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjnych, inhalacji, masażu i fizjoterapii w celu łagodzenia przebiegu chorób.

## III. Budowa

1. Błat drewniany pokryty tapicerką - 1 szt.
2. Metalowy stelaż stolika - 1 szt.
3. Półka boczna - 1 szt. (wyposażenie dodatkowe)
4. Półka dolna - 1 szt. (wyposażenie dodatkowe)
5. Stopka regulacyjna - 1 szt.

## IV. Obsługa

Po ustawieniu stolika w miejscu przeznaczenia sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu. Stolik można w łatwy sposób wypoziomować za pomocą wkręcanej stopki (6).

## V. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active..
2. **Drewno, sklejka.** Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych. Uwaga! Drewno jako naturalny surowiec może posiadać różnice w układzie słoju, różnice w odcieniach koloru jak i naturalne wstawki typu: smugi, kropki. Nie obniża to jakości wyrobu a wręcz podkreśla jego naturalne pochodzenie. Cechy takie nie są podstawą do reklamacji.
3. **Eko - skóra, skaj.** Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

## VI. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active.

## VII. Uwagi eksploatacyjne

1. Stolik przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednego dziecka jednocześnie,
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stolika wraz z pacjentem,
3. Zabrania się gwałtownego siadania na stolik (wskakiwania),
4. Zabrania się siadania, klęknięcia i opierania się na półkach.

