

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **STOLIKA 2, STOLIKA 3**

#### **WYG23, WYG24**



### I. Dane techniczne

Wysokość	90 cm
Szerokość	50 cm
Głębokość	40 cm
Dopuszczalne obciążenie półki	10 kg

### II. Zastosowanie

Stoliki 2 i 3 znajdują swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich, szpitalach, salonach masażu. Stosuje się go jako stolik na leki jak również na przedmioty które chcesz mieć "pod ręką". W stolikach zostały zastosowane kółka, które pozwolą na wygodne przesuwanie w miejsca wygodne dla Ciebie.

### III. Budowa

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Konstrukcja metalowa | 1 szt.                               |
| 2. Półka metalowa       | 2 szt. (stolik 2), 3 szt. (stolik 3) |
| 3. Kółka                | 4 szt.                               |

### IV. Akcesoria

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Misy do stolika | 1 szt. lub 2 szt. |
|--------------------|-------------------|

### V. Obsługa

1. Ustawić stolik na twardym podłożu.
2. W przypadku domówienia mis do stolika zamontować metalowy wieszak na mise(4) w otworze (5), następnie włożyć do niego mise(6).
3. Pozostałe czynności podczas korzystania ze stolika wykonuje użytkownik.

### VI. Konserwacja

Konserwacja polega na pocieraniu wilgotną szmatką stolika na mokro, można stosować detergenty rozpuszczone w ciepłej wodzie.

Do czyszczenia stolika nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierowaną! Stolik może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

### VII. Zalecenia

1. Użytkować stolik zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

STOLIK 2  
WYG23



STOLIK 3  
WYG24

