

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STOŁÓW DO REHABILITACJI ATLET PLUS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

STOŁÓW DO REHABILITACJI ATLET PLUS



Atlet Plus E - Wysokość leżyska sterowana siłownikiem elektrycznym DEWART (LINAK):

- zasilanie 230 V przez zasilacz bezpieczny 220V / 24V
- moc zasilania 140 W
- siła na śrubie 6000 W

I. Dane techniczne

Wysokość minimalna stołu	550 ± 10 mm
Wysokość maksymalna stołu	950 ± 10 mm
Szerokość leżyska	680 ± 5 mm
Długość leżyska	1980 ± 5 mm
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 35° (w górę)
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 85° (w dół)
Obciążenie maks. stołu	160 kg
Masa stołów	85 kg ± 2 kg

II. Zastosowanie

Stoły te przeznaczone są do masażu, kinezyterapii indywidualnej jako wyposażenie do kabiny Ugul.

III. Obsługa

Po ustawieniu stołu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu i czy jest ustawiony w poziomie. Do poziomowania stołu służą stopki, które umożliwiają unoszenie lub opuszczanie nóg stołu. Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku stołu na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje masażysta, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole. Pomaga także bezpiecznie opuścić stół po wykonaniu zabiegu.

Atlet Plus E - regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego

Stół z siłownikiem elektrycznym wymaga podłączenia przewodu zasilającego do gniazdka. Podnoszenie i opuszczanie ramy stołu odbywa się poprzez naciśnięcie jednego z przycisków znajdujących się na pilocie ze strzałką w dół (opuszczanie leżyska) i w górę (podnoszenie leżyska). Zwolnienie przycisku na pilocie powoduje zatrzymanie ramy stołu na odpowiedniej wysokości.

IV. Konserwacja i czyszczenie

1. Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych,
2. Eko - skóra, skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami. Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem.

V. Uwagi eksploatacyjne i zalecenia

1. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem oraz siadania na podglówku.
3. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi, zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

Atlet Plus E - Wysokość leżyska sterowana siłownikiem elektrycznym DEWART (LINAK):

- zasilanie 230 V przez zasilacz bezpieczny 220V / 24V
- moc zasilania 140 W
- siła na śrubie 6000 W

I. Dane techniczne

Wysokość minimalna stołu	550 ± 10 mm
Wysokość maksymalna stołu	950 ± 10 mm
Szerokość leżyska	680 ± 5 mm
Długość leżyska	1980 ± 5 mm
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 35° (w górę)
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 85° (w dół)
Obciążenie maks. stołu	160 kg
Masa stołów	85 kg ± 2 kg

II. Zastosowanie

Stoły te przeznaczone są do masażu, kinezyterapii indywidualnej jako wyposażenie do kabiny Ugul.

III. Obsługa

Po ustawieniu stołu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu i czy jest ustawiony w poziomie. Do poziomowania stołu służą stopki, które umożliwiają unoszenie lub opuszczanie nóg stołu. Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku stołu na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje masażysta, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole. Pomaga także bezpiecznie opuścić stół po wykonaniu zabiegu.

Atlet Plus E - regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego

Stół z siłownikiem elektrycznym wymaga podłączenia przewodu zasilającego do gniazdka. Podnoszenie i opuszczanie ramy stołu odbywa się poprzez naciśnięcie jednego z przycisków znajdujących się na pilocie ze strzałką w dół (opuszczanie leżyska) i w górę (podnoszenie leżyska). Zwolnienie przycisku na pilocie powoduje zatrzymanie ramy stołu na odpowiedniej wysokości.

IV. Konserwacja i czyszczenie

1. Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych,
2. Eko - skóra, skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami. Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem.

V. Uwagi eksploatacyjne i zalecenia

1. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem oraz siadania na podglówku.
3. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi, zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.