

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STOŁÓW DO REHABILITACJI STUDIO Ł



INSTRUKCJA OBSŁUGI

STOŁÓW DO REHABILITACJI STUDIO Ł



Studio Ł - Wysokość leżyska sterowana ręcznie przy pomocy korbki w dolnej części stołu.

Studio EŁ - Wysokość leżyska sterowana siłownikiem elektrycznym DEWART (LINAK):

- zasilanie 230 V przez zasilacz bezpieczny 220V / 24V
- moc zasilania 140 W
- siła na śrubie 6000 W

Studio HŁ - Wysokość leżyska regulowana siłownikiem hydraulicznym.

Siła pchania 10000 N

I. Dane techniczne

Wysokość minimalna stołu	550 ± 10 mm
Wysokość maksymalna stołu	850 ± 10 mm
Szerokość leżyska	680 ± 5 mm
Długość leżyska	1950 ± 5 mm
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 35° (w górę)
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 60° (w dół)
Obciążenie maks. stołu	150 kg
Masa stołów	55 kg ± 2 kg

II. Zastosowanie

Stoły te przeznaczone są do masażu, kinezyterapii indywidualnej jako wyposażenie do kabiny Ugul.

III. Obsługa

Po ustawieniu stołu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu i czy jest ustawiony w poziomie. Do poziomowania stołu służą stopki, które umożliwiają unoszenie lub opuszczanie nóg stołu. Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku stołu na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje masażysta, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole. Pomaga także bezpiecznie opuścić stół po wykonaniu zabiegu.

Studio Ł - regulacja wysokości za pomocą siłownika ręcznego

Stół wyposażony jest w śrubowy mechanizm podnoszenia leżyska. Aby zmienić wysokość leżyska należy pokręcać korbą w prawo - podnoszenie leżyska, w lewo - opuszczanie.

Studio HŁ - regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego

1. Podnoszenie odbywa się poprzez naciskanie nogą na dźwignię pompy siłownika, która powoduje unoszenie się lub opuszczanie leżyska stołu na odpowiednią wysokość.
2. Opuszczanie polega na naciśnięciu dźwigni od spodu aż rama stołu opuści się na żadaną wysokość. Gdy opuszczamy leżysko bez pacjenta należy nacisnąć ręką na blat stołu, aby wywołać siłę skierowaną w dół.

Studio EŁ - regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego

Stół z siłownikiem elektrycznym wymaga podłączenia przewodu zasilającego do gniazdka. Podnoszenie i opuszczanie ramy stołu odbywa się poprzez naciśnięcie jednego z przycisków znajdujących się na pilocie ze strzałką w dół (opuszczanie leżyska) i w górę (podnoszenie leżyska). Zwolnienie przycisku na pilocie powoduje zatrzymanie ramy stołu na odpowiedniej wysokości.

IV. Konserwacja i czyszczenie

1. Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych,
2. Eko - skóra, skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetrarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami. Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem.

V. Uwagi eksploatacyjne i zalecenia

1. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem oraz siadania na podglówku.
3. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi, zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

Studio Ł - Wysokość leżyska sterowana ręcznie przy pomocy korbki w dolnej części stołu.

Studio EŁ - Wysokość leżyska sterowana siłownikiem elektrycznym DEWART (LINAK):

- zasilanie 230 V przez zasilacz bezpieczny 220V / 24V
- moc zasilania 140 W
- siła na śrubie 6000 W

Studio HŁ - Wysokość leżyska regulowana siłownikiem hydraulicznym.

Siła pchania 10000 N

I. Dane techniczne

Wysokość minimalna stołu	550 ± 10 mm
Wysokość maksymalna stołu	850 ± 10 mm
Szerokość leżyska	680 ± 5 mm
Długość leżyska	1950 ± 5 mm
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 35° (w górę)
Regulacja odchylenia zagłówek	0° do + 60° (w dół)
Obciążenie maks. stołu	150 kg
Masa stołów	55 kg ± 2 kg

II. Zastosowanie

Stoły te przeznaczone są do masażu, kinezyterapii indywidualnej jako wyposażenie do kabiny Ugul.

III. Obsługa

Po ustawieniu stołu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu i czy jest ustawiony w poziomie. Do poziomowania stołu służą stopki, które umożliwiają unoszenie lub opuszczanie nóg stołu. Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku stołu na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje masażysta, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole. Pomaga także bezpiecznie opuścić stół po wykonaniu zabiegu.

Studio Ł - regulacja wysokości za pomocą siłownika ręcznego

Stół wyposażony jest w śrubowy mechanizm podnoszenia leżyska. Aby zmienić wysokość leżyska należy pokręcać korbą w prawo - podnoszenie leżyska, w lewo - opuszczanie.

Studio HŁ - regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego

1. Podnoszenie odbywa się poprzez naciskanie nogą na dźwignię pompy siłownika, która powoduje unoszenie się lub opuszczanie leżyska stołu na odpowiednią wysokość.
2. Opuszczanie polega na naciśnięciu dźwigni od spodu aż rama stołu opuści się na żadaną wysokość. Gdy opuszczamy leżysko bez pacjenta należy nacisnąć ręką na blat stołu, aby wywołać siłę skierowaną w dół.

Studio EŁ - regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego

Stół z siłownikiem elektrycznym wymaga podłączenia przewodu zasilającego do gniazdka. Podnoszenie i opuszczanie ramy stołu odbywa się poprzez naciśnięcie jednego z przycisków znajdujących się na pilocie ze strzałką w dół (opuszczanie leżyska) i w górę (podnoszenie leżyska). Zwolnienie przycisku na pilocie powoduje zatrzymanie ramy stołu na odpowiedniej wysokości.

IV. Konserwacja i czyszczenie

1. Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych,
2. Eko - skóra, skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetrarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami. Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem.

V. Uwagi eksploatacyjne i zalecenia

1. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem oraz siadania na podglówku.
3. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi, zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.