


INSTRUKCJA OBSŁUGI I SCHEMAT MONTAŻU USER GUIDE AND INSTRUCTION OF THE MONTAGE

TABORET DELTA STOOLS DELTA



Wersja 1.0
Jasło 2011

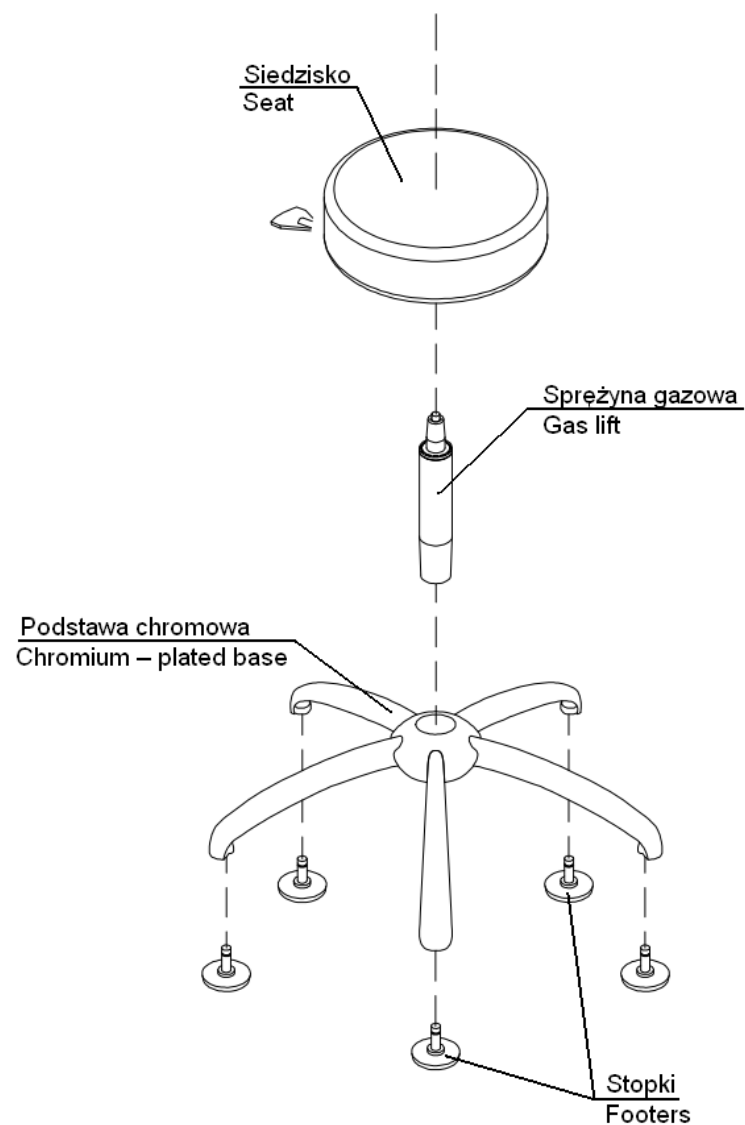

I. Budowa i parametry techniczne.

Taboret z chromowaną podstawą o średnicy 640 mm na stopkach. Regulowany w zakresie 490 – 610 mm za pomocą sprężyny gazowej.

II. Obsługa

Obsługa taboretu sprowadza się do regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

III. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active..
2. **Eko – skóra, skaj.** Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetrarcia powierzchni można zastosować: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

IV. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active.

V. Zalecenia

1. Użytkować taborety zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

VI. Elementy składowe i montaż:

I. Technical details

Delta – chromium – plated base on footers.
base - fi 640 mm
height adjusted: 490 - 610 mm

II. Design

Delta – stool with a chromium – plated base on footers with a diameter of 640 mm.
Height adjusted with a range of 490 – 610 mm with a gas lift.

III. Operation

Height adjustment is easy to operate thanks to the gas lift.

IV. Maintenance

Maintenance involves washing or cleaning the upholstery and table structure with a wet cloth, using commercially available cleaning agents for dermatoid materials and varnished wood. Do not use rough chemicals like dissolvents, petrol or acetone, as they may permanently damage or discolor the upholstery and wood varnish! The stool may be disinfected with generally used agents based on alcohol, chloramine, aldesan. These agents should be used with appropriate permits.

V. Recommendations

1. Use the stool according to these instructions.
2. Read and observe the terms of the guarantee.
3. Service your stool after two years of use.

VI. Components