

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WOLNOSTOJĄCEGO
WIESZAKA NA RĘCZNIK
WYG20



I. Dane techniczne

Wysokość	90 cm
Szerokość	46 cm
Długość	70 cm
Waga	3 kg

II. Zastosowanie

Wieszak na ręcznik wolnostojący znajdują swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich, szpitalach, salonach masażu w celu utrzymania higieny i estetyki leżanek, stołów do masażu. Na wieszaku można zawiesić rolkę z podkładem higieniczny celulozowym o trzech różnych szerokościach 50 cm, 60 cm, 70 cm.

III. Budowa

- | | | |
|----|-----------------------------|--------|
| 1. | Stelaż metalowy | 1 szt. |
| 2. | Regulacja długości wieszaka | 1 szt. |
| 3. | Stopki plastikowe | 4 szt. |

IV. Obsługa

1. Ustawić wieszak na twardym podłożu.
2. Aby regulować długość wieszaka należy wcisnąć zabezpieczenie następnie ustawić na wybraną przez siebie długość (w zależności od szerokości rolki podkładu higienicznego celulozowego). Należy zwrócić uwagę czy po wybraniu długości wieszaka zabezpieczenie znajduje się w otworze.
3. Pozostałe czynności podczas korzystania z wieszaka wykonuje użytkownik.

V. Konserwacja

Konserwacja polega na pocieraniu wilgotną szmatką wieszaka na mokro, można stosować detergenty rozpuszczone w ciepłej wodzie.

Do czyszczenia wieszaka nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierowaną! Wieszak może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Zalecenia

1. Użytkować wieszak zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

